

CHEGOU!

EQUIPO PARA SONOCA

NACIONAL GVFLX

Produto de Uso único

EQUIPO DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO DURANTE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS

VENDA EXCLUSIVA

O Equipamento para Irrigação e Aspiração é um dispositivo projetado para proporcionar a irrigação e aspiração em procedimentos cirúrgicos.

O equipamento é composto de vários tubos flexíveis que conduzem o fluido contido em bolsas, pela gravidade e pela ação mecânica do motor da bomba de irrigação em que será conectado, que faz uma constrição controlada dos tubos de forma a controlar a pressão e assim, movimentar o fluido.

A fabricação em materiais como policarbonato, silicone, Mangueiras de PVC flexível, polipropileno, ABS, PVC rígido, proporcionam ainda mais segurança.

- DESCARTÁVEL - USO ÚNICO
- ÓTIMA VISIBILIDADE E FACILIDADE DA MANIPULAÇÃO DA INSTRUMENTAÇÃO
- QUALIDADE E PREÇO COMPETITIVO
- FABRICAÇÃO GVFLX E VENDA EXCLUSIVA PANMEDICA



QUALIDADE E PREÇO COMPETITIVO!


ISENTO DE ICMS


PANMEDICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

EQUIPO PARA IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO

COMPOSIÇÃO

Peças em policarbonato, película de silicone, Mangueiras de PVC flexível, polipropileno, ABS, PVC rígido, tubo de silicone.

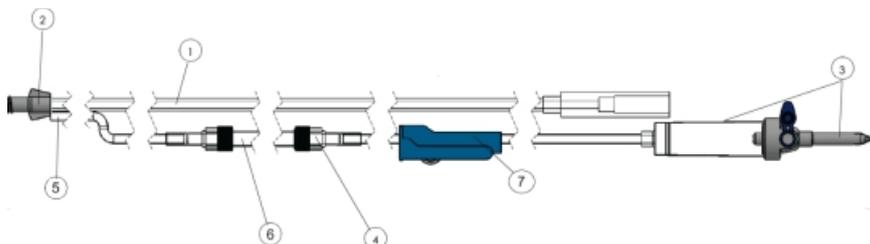

Apresentação em embalagem primária (interna Envelope confeccionado em papel grau cirúrgico 60g com laminado PET/PE 52g, devendo estar livre de impurezas e contaminantes. Com indicador químico indicando que alterar de cor após exposto gás ETO, contendo 01 produto. As embalagens mencionadas são devidamente seladas e rotuladas.

MANIPULAÇÃO

O produto é fornecido esterilizado e em embalagem lacrada. A embalagem deve ser aberta apenas no momento do uso ambiente cirúrgico e manipulada com luvas, evitando o contato com outros materiais. **Caso a embalagem esteja rompida ou violada, não utilizar o produto e efetuar descarte de acordo com as normas hospitalares.**

- Temperatura máxima de armazenamento 35°.
- Umidade relativa máxima: 80%.
- Empilhamento máximo de 7 caixas.

Siga corretamente as indicações de armazenamento e advertências indicadas na embalagem e instruções de uso.

Fabricado por:
GVFLEX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA
CNPJ: 31.531.888/0001-12 - Registro na ANVISA nº: 81919869001

FALE COM NOSSO COMERCIAL!



WWW.PANMEDICA.COM.BR

CLIQUE PARA ACESSAR!

ADVERTÊNCIAS

- Proibido reprocessar.
- Utilizar o produto somente se seus componentes estiverem integralmente constituídos.
- Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem: quebras, rebarbas, componentes se soltando e presença de material estranho.

MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO:
Esse produto é fornecido ESTÉRIL por ETO (Óxido de Etileno).

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja 3 anos.



PANMEDICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

RUA AUGUSTA, 1378 - S/L - SÃO PAULO - SP - BRASIL
55 (11) 3289-4600 | (11) 98105-7550 | (11) 98105-4840
PAN@PANMEDICA.COM.BR