


LEVICS

PRECISÃO PARA ESPECIALISTAS ASPIRAÇÃO ULTRASSÔNICA



A ressecção de tumores intracranianos e espinhais requer um procedimento preciso para preservar as estruturas circundantes o máximo possível. A peça de Mão LEVICS da Söring foi desenvolvida especialmente para esse desafio e, portanto é caracterizada por seu excelente design. Com sua frequência de trabalho de 35 kHz, fragmenta tumores de diferentes consistências com precisão e eficácia.

Graças a sua aspiração integrada, os fragmentos do tumor são removidos imediatamente. Além disso, a peça de mão impressiona com seu baixo peso, reduzido em 10% em relação as peças de mão anteriores. Isso suporta um trabalho seguro por longos períodos de cirurgia. Além disso, a forma delicada e angular do corpo da peça de mão garante uma visão ideal do campo cirúrgico.

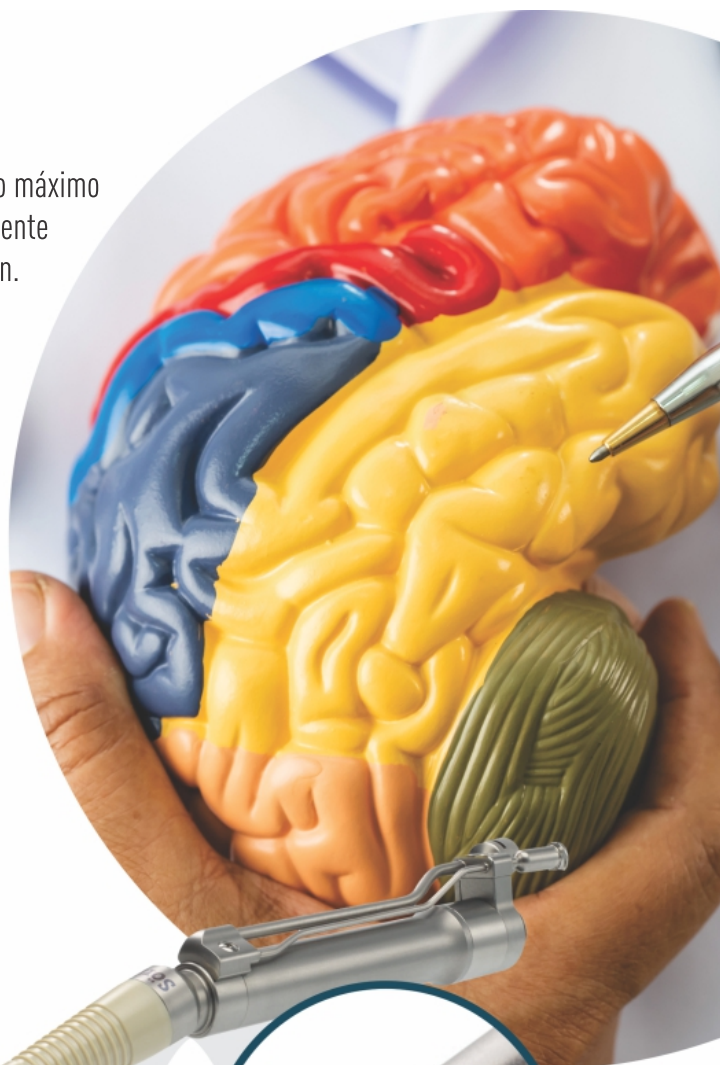

- PESO REDUZIDO PARA LONGOS PROCEDIMENTOS
- CORPO ANGULADO QUE PERMITE MELHOR VISÃO DO CAMPO CIRÚRGICO
- ASPIRAÇÃO QUE PERMITE FLUXO DE TRABALHO CONTÍNUO

Flexibilidade e modularidade

A peça de mão LEVICS, possui dois Sonotrodos com diferentes comprimentos e diâmetros que permitem otimização no tratamento de vários tipos de lesões diferentes.



**SONOTRODOS
REUTILIZÁVEIS
COM DIFERENTES
COMPRIMENTOS**

PANMEDICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

Os SONOTRODOS podem ser facilmente montados e substituídos em qualquer momento.

616K0001 - 36mm - EXT. INT. 2.0mm / 1.4mm - 5 CICLOS

616K0002 - 98mm - EXT. INT. 2.0mm / 1.4mm - 5 CICLOS



CLIQUE E COMEÇE USAR

Montagem rápida e Segura do Sonotrodo

A peça de mão LEVICS está pronta para uso em segundos, em função do conceito especial de montagem do Sonotrodo. Com a chave de torque, o Sonotrodo pode ser montado de maneira rápida e fácil, sem a necessidade de ferramentas adicionais. Um clique claramente audível indica que o Sonotrodo e o corpo da peça de mão estão conectados com segurança.


1

Verifique se a chave de torque está pronta para uso.




2

Coloque a chave de torque no Sonotrodo.

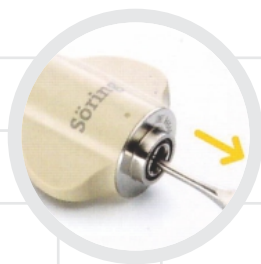

3

Gire!

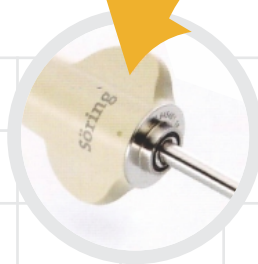

CLIQUE E COMEÇE

Após o CLICK, o Sonotrodo está conectado.



LEVICS

Código	92-501
Comprimento	170mm
Peso	67g
Ângulo	15°

Material	Titânio
Irrigação e aspiração	Sim
Reprocessamento	150 ciclos

VANTAGENS

O gerador ultrassônico SONOCA 300

- Oferece irrigação e aspiração integradas;
- Máxima preservação de tecidos, evitando sangramentos indesejados;
- Os parâmetros podem ser facilmente ajustados, por sua interface intuitiva.



Procure e siga @panmedica nas redes



WWW.PANMEDICA.COM.BR

CLIQUE PARA ACESSAR!



PANMEDICA
CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARA A VIDA

RUA AUGUSTA, 1378 - S/L - SÃO PAULO - SP - BRASIL
55 (11) 3289-4600 | (11) 98105-7550 | (11) 98105-4840
PAN@PANMEDICA.COM.BR